



## Genbehandling af værnemidler

I forbindelse med Covid-19 har man været nødt til at have mulighed for genbehandling af udvalgte værnemidler.

Overalt gælder det at:

- Rent og urent opbevares adskilt holdes adskilt
- Der anvendes handsker til genbehandlingsprocedurer, skift mellem rengøring og desinfektion.

Øjenbeskyttelse		
	Maskinel genbehandling	Manuel genbehandling
<p><b>Briller</b></p>  <p>Disse er flergangs</p> <p>Findes i forskellig udformninger</p>	<p>Instrumentopvaskemaskine, som rengør og desinficere med varme – tal evt. med Teknisk afsnit.</p> <p>Disse desinficerende maskiner er overvejende indstillet til at desinficere med temp. Omkring 90 grader i kort tid.</p> <p>Nogle briller tåler dette.</p> <p>Et program som desinficere med 75 grader i 32 minutter, ofte med en tørring på 55 grader.</p> <p>Udstyret skal placeres i maskinen, så der kommer vand på alle sider, og der må ikke være samles vand i udstyret under behandlingen.</p>	<p>Rengøring med vand og sæbe eller rengøringsklud (grøn) efterfulgt af en desinfektion med sprit.</p>
<p><b>Briller med udskifteligt visir</b></p>  <p>Bøjle-stang, hvor der kan påsættes visir.</p> <p>Visir er primært engangs</p>	<p>Bøjlestangen tåler genbehandling i instrumentopvasker på ovenstående programmer.</p>	<p>Det samlede sæt kan rengøres med vand og sæbe eller rengøringsklud (grøn) efterfulgt af en desinfektion med sprit.</p>
<p><b>Heldækkende visir</b></p>  <p>Visir er primært engangs</p> <p>Findes i forskellig udformninger</p>	<p>Ingen mulighed</p>	<p>Selve visiret kan genbehandles med rengøringsklud (grøn) efterfulgt af en desinfektion med sprit.</p> <p>Udstyret er efter genbehandlingen personligt, der bør sættes navn på.</p>